

Pansement hydrocellulaire Non Adhésif à l'ibuprofène
Pansement hydrocellulaire Soft-Hold (micro-adhérent) à l'ibuprofène



IFU23312816 V6 Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S.
© [06-2012] Tous droits réservés à Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danemark.

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour le patient. Le recyclage, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent altérer les caractéristiques du produit et faire courir au patient un risque de dommages corporels ou d'infection.

Contre-indications

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu si l'utilisateur (patient ou professionnel de la santé) présente une hypersensibilité connue à l'ibuprofène, à l'acide acétylsalicylique ou à d'autres AINS, notamment si elle est associée à des antécédents d'asthme, de rhinite ou d'urticaire, ou à l'un des composants du pansement.

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sur les plaies infectées, notamment en cas d'érysipèle. Un traitement approprié doit être instauré.

En cas de réaction allergique, vous pouvez contacter les Laboratoires Coloplast pour de plus amples informations.



Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu chez la femme enceinte.



Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu chez les enfants de moins de 12 ans sauf avis contraire du médecin.

Ne pas dépasser la dose indiquée.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold ne doivent pas être utilisés sur les sites donneurs de greffe.

Précautions

Les plaies infectées, les plaies diabétiques et celles d'origine exclusivement ou principalement artérielle doivent faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, en accord avec les règles de Bonnes Pratiques locales.

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu avec des solutions oxydantes telles que les solutions d'hypochlorite (type Dakin) ou l'eau oxygénée. Après utilisation de toute autre solution, s'assurer qu'elle est complètement évaporée et que la peau est sèche avant d'appliquer le pansement.

L'ibuprofène peut, dans de rares cas, causer des réactions allergiques sévères.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu doivent être retirés avant les traitements ou examens exposant le patient à des radiations, du type radiographie, échographie, diathermie, micro-ondes ou imagerie par résonance magnétique. Si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser.

Conserver hors de portée des enfants.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold doivent être stockés en position horizontale.

Conserver à l'abri de la lumière.

À usage externe exclusivement.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Application



1. Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif
Appliquer la face non imprimée du pansement au contact de la plaie.



2. Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold

Retirer le feuillet protecteur et appliquer la face non imprimée du pansement au contact de la plaie.

Retrait



Pour retirer le pansement, le soulever délicatement à partir des coins.

Description

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont stériles, à usage unique, constitués d'une mousse de polyuréthane souple et hautement absorbante, contenant de l'ibuprofène (0,5 mg/cm²) dispersé de façon homogène dans la mousse. Ils maintiennent un milieu humide favorable à la cicatrisation et assurent un drainage optimal des exsudats. Au contact des exsudats, l'ibuprofène est libéré dans le lit de la plaie.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont recouverts d'un film semi-perméable, perméable à l'air et imperméable à l'eau et aux bactéries.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésifs sont adaptés aux plaies présentant une peau péri-lésionnelle lésée/fragilisée.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold, grâce à leur couche micro-adhérente, sont faciles à appliquer et restent en place lors de la pose ou du retrait du pansement secondaire ou d'une bande de compression.

Indications

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont indiqués pour le traitement de nombreux types de plaies exsudatives tels que les ulcères de jambe, les escarres et les plaies du pied diabétique non infectées.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés sur les brûlures du second degré, les plaies post-opératoires et les dermabrasions.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif peuvent être utilisés sur les sites donneurs de greffe.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés pendant 6 semaines maximum tant que cela est cliniquement indiqué.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu maintiennent un environnement humide favorable à la cicatrisation et peuvent réduire les douleurs causées par la destruction tissulaire.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés conjointement avec une bande de compression.

Mode d'emploi

Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu

Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique. Sécher délicatement le pourtour de la plaie. L'utilisation en association avec les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu, d'agents nettoyants autres que l'eau tiède ou le sérum physiologique n'a pas été étudiée.

En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre produit similaire, il convient de laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement.

Retirer le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu de son emballage de façon aseptique. Ne pas toucher la face non imprimée du pansement.

Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu conformément aux illustrations et aux instructions du mode d'emploi. Choisir un pansement dont la mousse dépasse les bords de la plaie d'au moins 2 centimètres. Pour les pansements de petite taille, un dépassement de 1 centimètre suffit.

Si la plaie est peu exsudative, le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu peut être humidifié avec du sérum physiologique stérile avant son application sur la plaie.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif et les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold doivent être maintenus à l'aide d'un pansement secondaire ou d'une bande de compression.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu doivent être changés à une fréquence dépendant de l'état clinique de la plaie ou lorsque l'exsudat approche le bord du pansement.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours selon la quantité d'exsudat, l'état du pansement et le type de plaie.

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés sur des surfaces allant jusqu'à 1 200 cm² (par exemple 3 pansements de 20 x 20 cm chacun). Dans ce cas, le pansement ne doit pas être changé plus de deux fois par jour, pour ne pas excéder une utilisation quotidienne de 2 400 cm² de pansement.

Symbole

WO	Numéro WO. Le numéro WO sur la boîte identifie un lot de conditionnement (le numéro de lot qui apparaît sur le conditionnement primaire correspond à un lot de production).
----	---