

Mode d'emploi

- 1) Nettoyer la plaie au sérum physiologique ou à l'eau du robinet si nécessaire.
- 2) Retirer le film protecteur transparent et appliquer Physiotulle sur la plaie.
- 3) Retirer le deuxième film protecteur.
- 4) Recouvrir Physiotulle d'un pansement secondaire.

Il est recommandé de changer le pansement à intervalles réguliers, environ tous les deux jours, bien que cette période puisse être raccourcie ou rallongée selon le type de plaie, la quantité d'exsudat et son évolution.

Symbole**WO**

Work Order (WO)/LOT Le numéro WO sur la boîte identifie un lot de conditionnement. Le n° de lot qui apparaît sur le sachet unitaire (conditionnement primaire) correspond à un lot de production.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.



3050 Denmark
CM0000000273 v3 Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S.
© [2012-03] Tous droits réservés à Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danemark.

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour le patient. Le recyclage, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d'infection pour le patient.

Mise en garde

Ne pas appliquer Physiotulle sur des patients souffrant d'allergie connue à l'un des composants.

En cas d'infection de la plaie, un traitement approprié doit être instauré par un professionnel de santé.

Stocker la boîte à plat et à température ambiante.

Conserver à l'abri de la lumière.

Pansement à usage unique, stérilisé par irradiation.

Ne pas appliquer ni restériliser Physiotulle si l'emballage est endommagé.

Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Indications

Physiotulle est indiqué dans le traitement des plaies aiguës (brûlures superficielles d'épaisseur partielle, sites donneurs, plaies postopératoires et dermabrasions) et des plaies chroniques (escarres et ulcères de jambe) après nettoyage de la peau et jusqu'à cicatrisation.

Description

Physiotulle est un pansement stérile non adhésif.

Il est constitué d'un tissu polyester imprégné de particules hydrocolloïdes (CMC) en suspension dans la vaseline.

Au contact de la plaie, les particules hydrocolloïdes absorbent les exsudats, se gélifient et forment avec la vaseline une émulsion qui maintient un milieu humide favorable à la cicatrisation. L'émulsion formée au contact des exsudats ne sèche pas et permet ainsi des changements de pansements atraumatiques et indolores.

Physiotulle présente une structure en réseau ouvert prévenant la macération. Il est finement tissé, minimisant le risque de piéger les bourgeons néoformés et évitant ainsi de traumatiser le lit de la plaie lors des changements de pansement.

Souple et confortable, Physiotulle peut être appliqué sur les plaies superficielles ou profondes et sur les plaies touchant des zones mobiles.