



## APHTES & petites plaies buccales

Pansement liquide prêt à l'emploi pour le traitement des aphtes (1 à 2 par crise < 1 cm de diamètre) et des petites plaies de la muqueuse buccale

### • Qu'est ce qu'un aphte ?

C'est une lésion superficielle de la muqueuse buccale qui se manifeste par une ulcération douloureuse à bords nets et fond blanc, entourée d'une muqueuse rouge vif. Les origines en sont mal connues, néanmoins certains facteurs peuvent favoriser leur apparition : l'hérédité, certains aliments, les traumatismes physiques (morsures de la muqueuse buccale, appareils dentaires), certains médicaments, le stress ou les hormones.

### • Comment agit URGO Aphtes et petites plaies buccales ?

Une fois appliqué, le film protecteur formé, visible, fin et souple :

- Isole des aliments et de la salive jusqu'à 4h
- Soulage rapidement et durablement la douleur
- Favorise la cicatrisation

### • Conseils d'utilisation

Essuyer un côté de la spatule sur le rebord du flacon.

Appliquer la quantité restante à l'aide du bout de la spatule de manière à bien recouvrir l'aphte ou la lésion.

Laissez sécher une dizaine de secondes puis fermer la bouche : un film visible se forme.

Si le film ne vous paraît pas recouvrir correctement l'aphte ou la lésion, renouveler l'opération.

A renouveler aussi souvent que nécessaire, jusqu'à 4 fois par jour et de préférence avant les principaux repas, jusqu'à cicatrisation complète (3 à 5 jours). Tant que le film reste visible, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle application. L'hygiène du produit est garantie par sa composition, il n'est donc pas nécessaire de nettoyer la spatule après utilisation.

### • Composition

Dérivé cellulosique, acide minéral, acides carboxyliques, alcool, eau, arôme, sucralose.

### • Contre-indications

Ne pas appliquer en cas d'aphtoses majeures (diamètres > 1cm) ou herpétiformes (aphtes de très petite taille présents en très grand nombre) qui nécessitent l'avis d'un médecin. Ne pas appliquer sur les plaies infectées, les brûlures, les plaies profondes (qui saignent).

Ne pas utiliser en cas d'allergie aux dérivés salicylés.

En l'absence d'étude chez les femmes enceintes ou allaitant, l'utilisation du produit n'est pas recommandée.

### • Précautions d'emploi

Bien refermer le flacon après usage.

Après ouverture, il est conseillé d'utiliser le produit dans les 6 mois.

Application sur la muqueuse buccale exclusivement.

Peut piquer à l'application.

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.

Ne pas gratter le film formé, il disparaîtra de lui-même.

En l'absence d'amélioration après 5 jours de traitement, consulter un médecin.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas boire le contenu du flacon.

Ne pas fumer lors de l'application, avant séchage complet du produit ou à proximité du flacon ouvert.

En cas de doute, consulter votre pharmacien.

Dans le cas de plaies buccales générées par le port d'un appareil dentaire, il est possible d'utiliser le produit dans la mesure où le produit n'est pas recouvert par l'appareil.

### • Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement. A conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

Date d'apposition du marquage CE : 2011

Date de dernière révision : 09-2014



Facilement  
inflammable

