


Comfeel® Plus

Ces conseils d'utilisation concernent tous les produits de la gamme Comfeel Plus.



Comfeel® Plus
Transparent

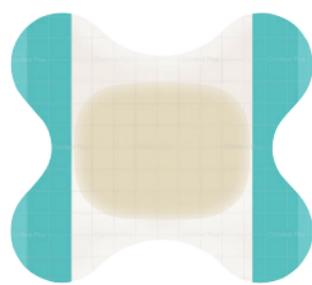

Comfeel® Plus
Contour



Comfeel® Plus
Plaques Mousse



Comfeel® Plus

Retrouvez la vidéo de la pose et du retrait de Comfeel sur :
<http://coloplast.to/comfeel>

Ou flashez ce QR code



Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S,
DK - 3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362
RCS Bobigny - Réf. 23319917 - Septembre 2017




Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

Gamme Comfeel® Plus

Appliquer et retirer Comfeel


Comfeel® Plus

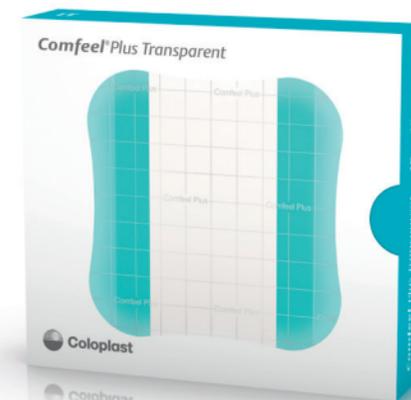


Comment appliquer **Comfeel® Plus** ?

- Nettoyer la plaie.
- Sécher la peau périlésionnelle avant application du pansement.
- La peau doit être exempte de corps gras.

1) Sortir le pansement de son emballage et retirer le feuillet protecteur central transparent

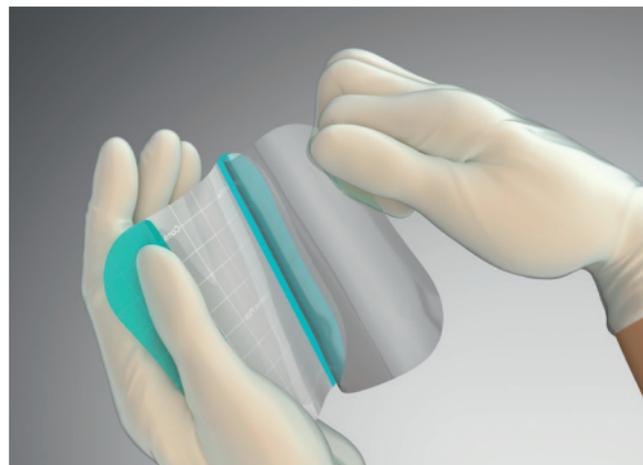

2) Poser le pansement sur la plaie sans l'étirer. Retirer un à un les feuillets protecteurs latéraux turquoise

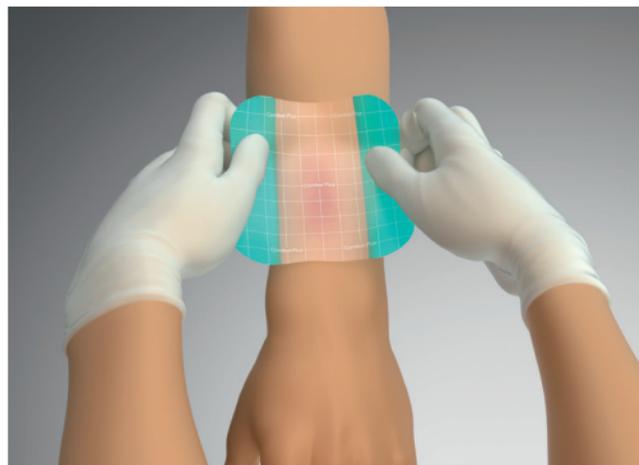

3) Passer délicatement la main sur le pourtour du pansement afin qu'il adhère parfaitement à la peau



Comment retirer **Comfeel® Plus** ?

- X** Ne pas soulever le pansement vers le haut.
- ✓** Casser l'adhésivité du pansement : saisir un angle du pansement et l'étirer latéralement en maintenant avec l'autre main la partie encore adhérente.



Répéter l'opération sur chaque angle en étirant le pansement parallèlement à la peau jusqu'à ce que celui-ci soit décollé.

Vous pouvez également utiliser un spray de retrait d'adhésif pour faciliter le retrait.