



UrgoK2 EST FACILE À PRESCRIRE

100% REMBOURSABLE¹²
NON SUBSTITUABLE¹¹

	Spécialiste	Médecin généraliste	IDE/IPA ⁸
Prescription	✓	✓	✗
Renouvellement	✓	✓	✗

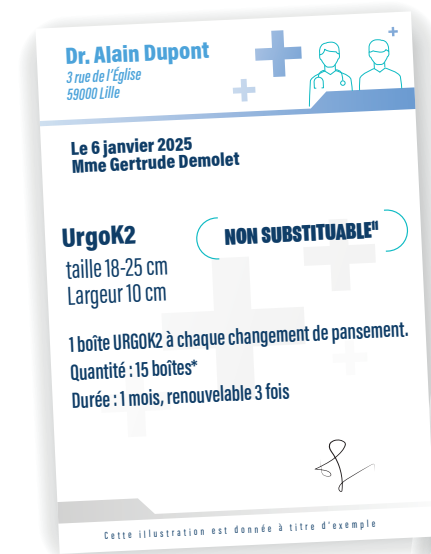

Associé à la Gamme
UrgoStart plus⁹
pour une efficacité optimisée

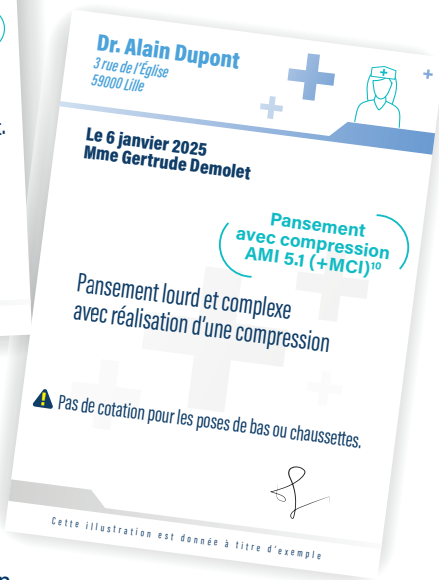

CONSEIL
Poursuivre le traitement jusqu'à consolidation de la cicatrisation. Il est conseillé de poursuivre le traitement 15 jours après cicatrisation.

* Si renouvellement des soins infirmiers (changement de bandes) tous les 2 jours.



UrgoK2

Taille de cheville	Largeur de bandes	Codes ACL
18-25 cm	10 cm	34010.967.457.9.5
25-32 cm	10 cm	34010.967.458.5.6

Existe également en largeur 8 et 12 cm

UrgoK2
Latex free

18-25 cm	10 cm	34010.206.449.3.4
25-32 cm	10 cm	34010.206.448.7.3

1. Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS décembre 2010. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr. 2. Rapport au Ministre Chargé de la Sécurité Sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et produits de l'Assurance Maladie au titre de 2014. Juillet 2013. Base de données de la CNAM : ulcère de jambe : 210 jours. 3. S. Meaume et al. Aetiological treatment of venous leg ulcers with compression therapy: real -life outcomes with two different procedures. J Wound Care VOL 32, NO 10, October 2023. 4. European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67. 5. Jünger M, Ladwig A, Bohbot S, et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care. 2009;18(11):474, 476-80. 6. Benigni JP, Lazareth I, Parpex P, et al. Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. J Wound Care. 2007;16(9):385-90. 7. Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. Br J Nurs. 2008;17(20):S16-24. 8. JORF - NOR : SSAH1817591A. 9. Gamme UrgoStart Plus & UrgoStart : Dispositifs Médicaux de classe IIb (BSI CE 2797). Intégralement remboursables LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel), et dans l'ulcère du pied chez le patient diabétique d'origine neuroischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d'infection IDSA/IWGDF), en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Indications: Traitement des plaies cutanées suivantes: ulcères de jambe, plaies du pied diabétique, escarres, autres plaies à risque de cicatrisation de longue durée, plaies récurrentes, ou plaies à risque de retard de cicatrisation. 10. Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) - Version en vigueur disponible sur www.ameli.fr. 11. Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant. 12. UrgoK2 & UrgoK2 Latex Free : Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Dispositif Médicaux de classe I. Indications : Traitement de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée, chez l'adulte. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ à 0.8). Lire attentivement la notice des produits avant utilisation (notamment pour les précautions d'emploi et contre- indications). Avis CNEDIMTS disponibles sur le site <https://www.has-sante.fr/>

Fabricant : Laboratoires Urgo. 01/2025. 958-CB 803300.



AVEC UrgoK2,
MENEZ LA DANSE
VERS LA CICATRISATION !



UrgoK2.
Parce qu'à 2, on panse autrement.

* Hors UrgoK2 Latex Free.



URGO
MEDICAL
Healing people®


UrgoK2 CONFORME AUX RECOMMANDATIONS¹

HAS

Ulcère ouvert
(Stade C6)


**BANDAGES MULTITYPES
EN 1^{ÈRE} INTENTION JUSQU'À
CICATRISATION COMPLÈTE**

Bande à allongement COURT
(inélastique)

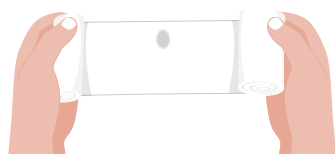

fournit la pression
nécessaire à la marche.

Bande à allongement LONG
(élastique)

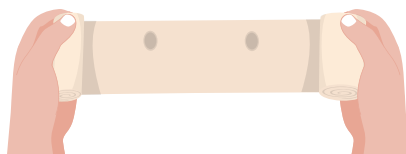

maintient la pression et le
dispositif en place au repos.

UrgoK2 EST EFFICACE³

-22 jours
de cicatrisation gagnés.




-705 €
de coût de traitement
global économisés.

UrgoK2 EST SIMPLE

» **EFFICACE** À LA MARCHÉ COMME
AU REPOS, JOUR ET NUIT.^{4,5}



» **BANDES ÉTALONNÉES**
POUR UNE BONNE POSE DU
PRODUIT.

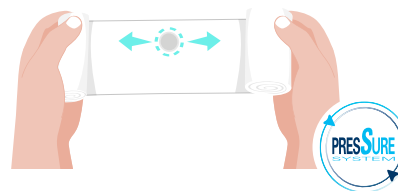

» **2 TAILLES DISPONIBLES** POUR
S'ADAPTER À LA MORPHOLOGIE
DE CHAQUE PATIENT.



UrgoK2 EST CONFORTABLE^{5,6}




9/10 PATIENTS JUGENT UrgoK2 confortable
DE JOUR COMME DE NUIT POUR UNE
MEILLEURE OBSERVANCE.

UrgoK2 EST FACILE À POSER⁷

ÉTAPE 1

Commencer le point
d'ancrage à la base
des orteils.

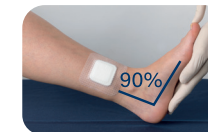

Appliquer
la pression à partir
de la cheville.



ÉTAPE 2

Conseil : éviter la surpression en la déroulant en amont



Compressiongo
Le nouvel outil d'aide à la pose

Suivez les étapes pour appliquer les
bandes et garantir une compression
continue, cohérente et confortable.

