


ONE CODE STYLO EJECTING

MODE D'EMPLOI DU STYLO AUTOPIQUEUR EJECTING

A utiliser avec les lancettes ONE CODE (Réf :5051)

Le stylo autopiqueur est utilisé pour obtenir pratiquement sans douleur, des échantillons de sang capillaire sur le bout du doigt et sur des sites alternatifs, destinés au contrôle de la glycémie.

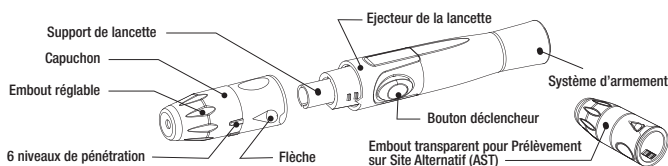

Avertissement !


Afin de réduire le risque d'infection :

- Ne jamais partager une lancette ou le stylo autopiqueur
- Toujours utiliser une nouvelle lancette stérile. La lancette est un dispositif jetable à usage unique.
- Éviter de mettre de la lotion, des huiles, de la saleté ou des débris dans ou sur les lancettes et le stylo autopiqueur
- La lancette usagée doit être jetée dans un conteneur spécialement adapté aux objets contaminés.


Ce stylo autopiqueur vous offre 6 niveaux de pénétration de la peau :




Réglage du stylo autopiqueur

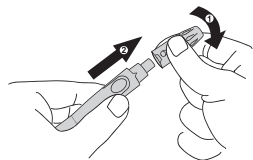

1. Tournez puis ôtez le capuchon du stylo autopiqueur.

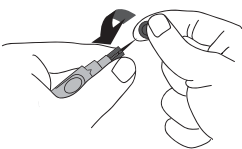


2. Insérez une lancette dans le support de lancette et enfoncez la bien jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sécurisée.

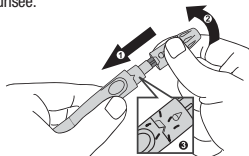


3. Tournez le disque de protection jusqu'à ce qu'il se détache de la lancette.

4. Remplacez puis tournez le capuchon en alignant la flèche sur le capuchon avec le bouton déclencheur. Attendez le "click" avant de procéder à la prochaine étape.

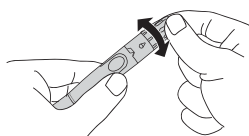

5. Choisissez la profondeur de pénétration en tournant l'embout réglable dans un sens ou un autre pour que la flèche sur le capuchon indique la profondeur de piqûre désirée.

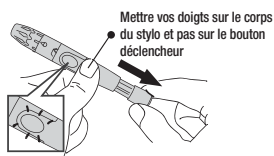


6. Tirez le système d'armement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous verrez un changement de couleur à l'intérieur du bouton déclencheur quand le stylo autopiqueur est prêt à être utilisé.

➤ S'il ne s'enclenche pas, le stylo autopiqueur a peut-être été enclenché au moment de l'insertion de la lancette.


Attention !

Avant de prélever une goutte de sang :

- Lavez et séchez vos mains avant de commencer.
- Choisissez le site de ponction soit au bout du doigt soit sur une autre partie du corps (AST)
- Massez le site de ponction pendant environ 20 secondes pour provoquer un afflux sanguin.

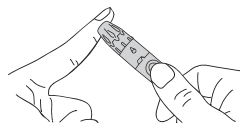

7. Tenez le bout du stylo autopiqueur fermement contre le site de ponction. Appuyez sur le bouton déclencheur pour piquer votre doigt, un clic indique que la piqûre est complète.

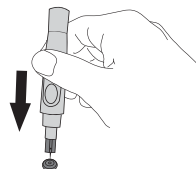

9. Retirez la lancette en tournant le capuchon. Remplacez le disque de protection sur la lancette usagée sur une surface dure en appuyant l'aiguille dans le disque.



8. Retirez le dispositif du site de ponction. Après pénétration de l'aiguille, essayez la première goutte de sang avec un mouchoir propre ou du coton. Pincez ensuite doucement la zone ponctionnée pour obtenir une autre goutte de sang. Faites attention de ne pas étaler l'échantillon de sang. Appliquez le sang sur la bandelette.




10. Ré-armez votre stylo autopiqueur. Faites glisser l'éjecteur vers l'avant pour éjecter la lancette usagée.

➤ Pour prélever du sang provenant d'autres zones que les doigts, utilisez l'embout transparent.

Prélèvement sur Sites Alternatifs (AST)

Le test sur d'autres sites que sur le bout de doigt est appelé Prélèvement sur Site Alternatif (AST). Veuillez lire la section sur le Prélèvement sur Site Alternatif dans le Manuel d'utilisation de votre système pour l'autosurveillance de la glycémie avant d'exécuter l'AST. Remplacer le capuchon du stylo autopiqueur par l'embout transparent. Tirez le système d'armement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Lorsque vous ponctionnez l'avant-bras, le bras, la main, la cuisse ou le mollet, évitez de piquer des zones avec des veines apparentes pour empêcher l'excès de saignement.

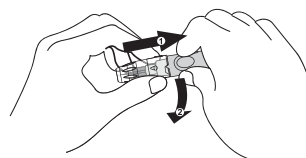

Nettoyage

La lancette est un dispositif jetable à usage unique. Le stylo autopiqueur est réutilisable.

Pour nettoyer le stylo autopiqueur, utilisez un savon doux et de l'eau pour essuyer l'extérieur du stylo autopiqueur. Ne rincez pas le dispositif sous l'eau. Désinfectez l'embout en le plaçant dans l'alcool à 70% pendant 10 minutes et laissez le sécher. Ne placez pas le dispositif dans un lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents.

Signification des symboles

Symbole	Signification
	Ne pas réutiliser
	Lire les instructions avant utilisation
	Utiliser avant
	N° de lot
	Fabricant
	Attention
	Représentant CE
	Stérilisé en utilisant l'irradiation
	Ne pas utiliser si la boîte est endommagée



MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F., No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24888, Taiwan (R.O.C.)

Importé et distribué par :
EVOLUPHARM
Rue Irène Caron ZI
60390 Auneuil