

Couleur	Noir
Format	140 x 150 mm
Taille police	1,2 mm

LACTIPLUS

Veillez lire attentivement et intégralement cette notice, elle contient des informations importantes sur votre traitement. Veillez la conserver pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Ce dispositif médical peut être obtenu sans prescription. Cependant, les gélules de LACTIPLUS doivent être utilisées conformément aux instructions d'utilisation pour parvenir à un résultat de traitement optimal.

Si vous avez besoin d'autres informations, demandez conseil à votre pharmacien. Si vos symptômes s'aggravent ou persistent, il est impératif de consulter un médecin.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LACTIPLUS est un dispositif médical indiqué pour traiter les symptômes du syndrome de l'intestin irritable : constipation, diarrhée, ballonnements et plus particulièrement la douleur abdominale.

Il contient la souche microbiotique *Lactobacillus gasseri* LA806, inscrite à la Collection Nationale de Culture des Micro-organismes. Sélectionnée par le Laboratoire Pileje, notamment pour ses grandes capacités d'adhésion aux cellules intestinales, elle forme un film protecteur à la surface de la paroi intestinale. Ainsi protégée, la muqueuse intestinale ne subit plus les attaques des bactéries pathogènes contenues dans l'intestin et autres toxines à l'origine de microlésions, inflammation, perturbations du transit et douleurs abdominales.

POSOLOGIE

Deux gélules de LACTIPLUS à avaler une fois par jour, 20 minutes avant un repas, avec un verre d'eau. Ne pas ouvrir la gélule.

Pour obtenir des résultats optimaux, LACTIPLUS doit être pris pendant une durée minimale de quatre semaines, à renouveler si nécessaire, selon les conseils de votre pharmacien ou de votre médecin.

COMPOSITION

Amidon de maïs, *Lactobacillus gasseri* LA806, stéarate de magnésium. Une gélule de LACTIPLUS contient 5 milliards de souches microbiotiques. Les gélules de LACTIPLUS ne contiennent aucun conservateur, édulcorant, arôme, ni de lactose, et gluten.



CONSERVATION

À conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

LACTIPLUS ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur le dessous de l'emballage.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

MISE EN GARDE

Veillez toujours prendre les gélules de LACTIPLUS en suivant les indications fournies par ces instructions d'utilisation. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

En cas d'oubli, il est déconseillé de rattraper la prise oubliée en doublant la posologie.

Tenir hors de la portée des enfants.

Si de nouveaux symptômes apparaissent ou si les symptômes persistent, veuillez consulter un médecin.

Grossesse et allaitement : aucun élément connu ne s'oppose à l'utilisation de LACTIPLUS chez la femme enceinte ou allaitante

Enfants : LACTIPLUS est réservé à l'adulte.

Interaction médicamenteuse : aucune interaction entre LACTIPLUS et des médicaments n'est connue. Toutefois, la souche LA806 pouvant être désactivée par une antibiothérapie, veillez à prendre LACTIPLUS 4 heures avant ou après un antibiotique.

EFFETS SECONDAIRES

À ce jour, aucun effet secondaire lié à la prise de LACTIPLUS n'a été constaté. En début de cure, une modification de l'activité intestinale peut être observée. Cette période d'adaptation est transitoire et normale, il est nécessaire de poursuivre le traitement.



RV1 FR/FL / mai 2019

Date de mise à jour : mai 2019

Fabricant :

PileJe - 37 quai de Grenelle
75015 PARIS - France
www.pileje.fr
Tél. : 02 40 83 93 93

PiLeJe

CE 0477

octobre 2018

LACTIPLUS

Gelieve de hele bijsluiter aandachtig door te lezen. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling. Gelieve de bijsluiter te bewaren voor eventueel later gebruik.

Dit medisch hulpmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Toch moeten de LACTIPLUS-capsules volgens de gebruiksaanwijzingen worden ingenomen voor een optimaal behandelingsresultaat.

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u uw apotheker om advies vragen. Als uw symptomen verergeren of aanhouden, moet u een arts raadplegen.

INFORMATIE OVER HET PRODUCT

LACTIPLUS is een medisch hulpmiddel voor het behandelen van de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom: constipatie, diarree, opgeblazen gevoel en, in het bijzonder, buikpijn.

Het bevat de microbiotische stam *Lactobacillus gasseri* LA806, gedeponeerde bij de Collection Nationale de Cultures de Microorganismes. De stam werd geselecteerd door het Laboratorium Pilele omwille van zijn goede adhesievermogen aan de darmcellen waardoor hij een beschermende laag vormt op het oppervlak van de darmwand. Dankzij deze bescherming zal het slijmvlies van de ingewanden niet langer lijden onder de aanvallen van ziekteverwekkende bacteriën in de darm en andere toxinen die microletfels, ontstekingen, verstoringen van de darmtransit en buikpijn kunnen veroorzaken.

DOSERING

Eén keer per dag, 20 minuten voor een maaltijd twee LACTIPLUS-capsules met een glas water innemen. De capsules niet openen.

LACTIPLUS moet gedurende minstens vier weken worden ingenomen voor een optimaal resultaat. Deze periode kan worden verlengd op advies van uw apotheker of arts.

SAMENSTELLING

Maiszetmeel, *Lactobacillus gasseri* LA806, magnesiumstearaat. Eén LACTIPLUS-capsule bevat 5 miljard microbiotische stammen. De LACTIPLUS-capsules bevatten geen conserveermiddelen, zoetstoffen of aroma's, en zijn vrij van lactose en gluten.

WAARSCHUWING

Neem de LACTIPLUS-capsules altijd in volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. Raadpleeg uw arts of apotheker bij twijfel.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Raadpleeg een arts als er nieuwe symptomen bijkomen of als de symptomen aanhouden.

Zwangerschap en borstvoeding: er zijn geen gegevens bekend die aantonen dat LACTIPLUS niet mag worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Kinderen: LACTIPLUS is voorbehouden voor volwassenen.

Interactie met andere geneesmiddelen: > er zijn geen interacties tussen LACTIPLUS en andere geneesmiddelen bekend. De stam LA806 kan echter minder efficiënt werken in geval van een antibiotica-behandeling. Het gebruik van LACTIPLUS wordt ontraden als u antibiotica neemt.

BIJWERKINGEN

Tot nu toe werden er geen bijwerkingen van het gebruik van LACTIPLUS vastgesteld. Bij het begin van de behandeling kan de darmwerking verstoord raken. Deze aanpassingsperiode is van voorbijgaande aard en normaal. U mag de behandeling niet stopzetten.



BEWARING

Te bewaren op een droge plek bij een temperatuur lager dan 25°C



Gebruik LACTIPLUS niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum op de onderkant van de verpakking.

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.



LACTIPLUS



RV1 FR/FL/mei 2019

Datum van de bijwerking : mei 2019

Fabrikant :

Pilele - 37 quai de Grenelle
75015 PARIS - Frankrijk
www.pileje.fr
Tel : 0032 15 43 25 44
(Pileje SA-NV Benelux)

PiLeJe

CE 0477 oktober 2018