

Mepiform®

Pansement auto-adhésif siliconé pour cicatrices



Description du produit

Mepiform est un pansement auto-fixant, mince, discret et souple. Le pansement est composé d'une couche d'enduction de silicone souple issue d'une technologie unique à base d'adhésif siliconé : la Technologie Safetac®, côté plaie. Elle minimise la douleur des patients et les traumatismes sur la plaie et la peau lors du retrait du pansement.

Mepiform est composé :

- d'un support (laminé) respirant et autorisant la douche (film de polyuréthane et non-tissé en viscosel)
- d'une couche d'enduction de silicone souple (issue de la Technologie Safetac®), côté plaie

Composition du pansement :

polyacrylate, polyuréthane, silicone, viscosel

Indications

Mepiform est indiqué pour le traitement des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, anciennes ou récentes. Il peut être utilisé en prophylaxie après fermeture des plaies pour prévenir la formation des cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser Mepiform chez des patients présentant une hypersensibilité connue aux matériaux/composants entrant dans la composition du produit.
- En cas de macération ou de réaction cutanée, retirer le pansement jusqu'à disparition des symptômes, puis reprendre le traitement en augmentant graduellement le temps de pose journalier. Si les symptômes persistent, arrêter le traitement et consulter un médecin.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser.

Mode d'emploi

Mepiform peut être utilisé par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.



Application

1. Ouvrir l'emballage et retirer le pansement.
2. Si nécessaire, découper à la taille voulue en conservant une marge d'1 cm minimum.
3. Mepiform doit être appliqué sur une peau sèche. Si des pommades ou des crèmes sont utilisées, le pansement doit déborder au-delà de la zone où elles ont été appliquées.
4. Retirer le feuillet protecteur et appliquer Mepiform sur la cicatrice. Ne pas étirer le pansement lors de la pose sur les articulations.

Renouvellement et retrait du pansement.

1. Pour un résultat optimal, Mepiform doit être porté 24h/24. Retirer le pansement une fois par jour pour examiner et nettoyer la peau. Le pansement est repositionnable.
 2. Dans des conditions normales d'utilisation, Mepiform doit être renouvelé tous les 7 jours ou lorsque le pansement n'adhère plus suffisamment.
 3. Mepiform autorise la douche.
- L'élimination doit être effectuée conformément aux normes environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Mepiform, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.

Mepiform® et Safetac® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.