

UrgoK2 le système multitype qui garantit une compression continue et fiable^{1,2}



Les fondamentaux

1 LE BON KIT



2 tailles disponibles

Pour choisir la taille du kit, mesurer la circonférence de la cheville 2 cm environ au dessus de la malléole.

2 LE BON ÉTIREMENT



Pour appliquer la bonne tension, bien étirer la bande et s'assurer que l'ovale devienne un cercle.


3 LE BON RECOUVREMENT



Pour appliquer le bon recouvrement, chaque nouvelle spirale doit recouvrir le cercle précédent.

La pose standard

APPLIQUER LA BANDE BLANCHE (bande à allongement court ouatée)

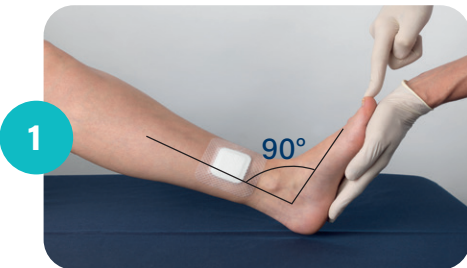

Positionner le pied à 90°. Commencer à la base des orteils avec 2 tours sans tension excessive.

Pour le kit 18 - 25 cm, le motif d'étalement doit se situer vers le haut de la jambe.



- Prendre le talon en réalisant une figure en 8 autour de la cheville.
- Veiller à bien couvrir le talon.



- A partir de la cheville, remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales et en se laissant guider par le motif d'étalement (cf fondamentaux de la pose UrgoK2 à gauche).
- Finir 2 cm sous le genou et couper l'excédent de bande.
- Fixer à l'aide d'un sparadrap.

APPLIQUER LA BANDE BEIGE (bande à allongement long cohésive)



- Pour que seule la bande blanche soit en contact direct avec la peau, laisser une marge d'1 cm au niveau des orteils et du genou.
- Appliquer la deuxième bande par-dessus la première selon la même technique.
- Couper l'excédent de bande, appuyer doucement les mains le long de la jambe pour assurer une bonne cohésion de la 2^{ème} bande.

Le nouvel outil d'aide à la pose Compressiongo



- ✓ TRUCS & ASTUCES
- ✓ CONSEILS
- ✓ GUIDE DE POSE PERSONNALISÉ

- ✓ MORPHOLOGIE ATYPIQUE
- ✓ BESOIN DE PROTÉGER



LAISSEZ-VOUS GUIDER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pour aller plus loin

FAÇONNER LA JAMBE

Si besoin, utiliser un dispositif de capitonnage (mousse, ouate, coussins...) pour rétablir une jambe en forme de cône inversé, nécessaire pour obtenir une compression dégressive.



- Selon la morphologie de la jambe, combler le creux, reconstituer le muscle du mollet ou renforcer la cheville à l'aide d'une bande d'ouate.
- Fixer le renfort avec du sparadrap.
- Puis poser les deux bandes d'UrgoK2 de façon standard, par-dessus le renfort.

PROTÉGER LES SAILLIES OSSEUSES

Utiliser des dispositifs de capitonnage (mousse, ouate, coussins...) afin de protéger les zones à risque de surpression (saillies osseuses) pour éviter d'éventuelles lésions.



- Découper une longueur de bande d'ouate.
- La positionner verticalement le long de la crête tibiale.
- Puis poser les deux bandes d'UrgoK2 de façon standard, par-dessus le renfort.

NOTE :

Il est préférable d'appliquer le système de compression UrgoK2 le matin au lever ou après avoir surélevé les jambes du patient pendant une heure, afin de minimiser l'œdème orthostatique.



Taille de cheville (cm)	Largeur de bandes (cm)	Code ACL
18 - 25	10	34010.967.457.9.5
25 - 32	10	34010.967.458.5.6

Existe également en largeur 8 et 12cm

100% Remboursable³



Taille de cheville (cm)	Largeur de bandes (cm)	Code ACL
18 - 25	10	34010.206.449.3.4
25 - 32	10	34010.206.448.7.3

URGO
MEDICAL
Healing people®

* Hors UrgoK2 Latex Free
1. Jünger et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care (2009) 18(11): 474-80. 2. European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67. 3. UrgoK2 et Urgo K2 Latex Free. Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Indications : Traitement de l'ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée, chez l'adulte. Contre indications : - Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec Indice de Pression Systolique (IPS) <0.8. - Patient souffrant de thrombose ischémique, de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de phlébite septique. - Ulcération ou œdème d'origine infectieuse. - Insuffisance cardiaque congestive décompensée. - Patient avec antécédent de pontage post-artériel. - Hypersensibilité connue à l'un des constituants - en particulier le latex pour UrgoK2. Lire la notice avant utilisation. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ à 0.8). Dispositif Médical de classe I. 04/2024 - 929-CB - 802868 - Fabricant : Laboratoires URGO.