

Urgocell Ag

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE LIPIDO-COLLOÏDE IMPREGNE DE SELS D'ARGENT

□ DESCRIPTION :

Urgocell Ag est un pansement absorbant imprégné de Sels d'Argent, issu de la technologie Lipido-colloïde (TLC), innovation des Laboratoires Urgo.

Urgocell Ag est un pansement absorbant, non adhésif semi-perméable, constitué de 3 couches :

- au contact de la plaie, une matrice cicatrisante TLC-Ag, constituée d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxymethylcellulose), de vaseline, de polymères de cohésion et de sels d'Argent,
- une compresse de mousse de polyuréthane absorbante,
- un support protecteur en polyuréthane.

□ PROPRIETES :

Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment avec la composante vaselinée un film lipido-colloïde.

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- Maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation.
- Gélification au contact de la plaie.
- Retrait atraumatique pour les tissus néoformés.
- Caractère indolore du renouvellement du pansement pour le patient.
- Respect de la peau péri-lésionnelle.

De plus, les ions Ag de la matrice cicatrisante TLC-Ag confèrent à **Urgocell Ag** une activité antibactérienne de contact capable de diminuer la charge bactérienne locale.

L'argent présente un large spectre d'action antimicrobien incluant les bactéries à Gram - et Gram + et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* Méti-R et *Streptococcus pyogènes* ainsi que sur *Pseudomonas aeruginosa* (bacille pyocyanique) qui sont les germes les plus souvent responsables de l'infection des plaies. Le pansement a démontré une activité antibactérienne in vitro se poursuivant pendant 7 jours. L'activité antibactérienne du pansement contribue également à réduire l'odeur causée par les micro-organismes présents dans la plaie.

La compresse de mousse de polyuréthane absorbante assure un drainage optimal des exsudats et des bactéries. Les microorganismes absorbés par la compresse sont ainsi directement tués par les ions Ag antibactériens. Cette compresse absorbante évite également tous phénomènes de macération au niveau de la peau péri-lésionnelle.

Le support est souple, conformable et très confortable. Il permet une bonne adaptation du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.

Urgocell Ag peut être posé sous compression élastique ou inélastique, grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

□ INDICATIONS :

Urgocell Ag est indiqué dans le traitement local des plaies exsudatives présentant des risques ou des signes d'infection locale : plaies chroniques (ulcères, escarres) et plaies aiguës (brûlures du 2nd degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc...).

En raison de son caractère non adhésif, le pansement **Urgocell Ag** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lesionnelle fragilisée.

□ MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer avec du sérum physiologique. En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique.
- Retirer les ailettes de protection du pansement.
- Appliquer le pansement **Urgocell Ag** sur la plaie.
- Maintenir avec une bande de fixation.
- Appliquer une bande de compression lorsque celle-ci est prescrite.
- Le renouvellement d'**Urgocell Ag** sera effectué tous les 1 à 3 jours, en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
- La durée maximale de traitement avec **Urgocell Ag** est de 1 mois.

□ MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Le traitement par **Urgocell Ag** se fera exclusivement sous surveillance médicale.
- L'utilisation de ce pansement ne dispense pas d'un traitement antibactérien systémique approprié pour les plaies infectées, selon les protocoles de soins locaux.
- L'utilisation conjointe avec d'autres traitements locaux est déconseillée.
- Éviter le contact du pansement avec des électrodes ou des gels conducteurs, utilisés lors d'un ECG et EEG.
- Ne pas utiliser en caisson hyperbare
- **Urgocell Ag** adhère aux gants chirurgicaux (latex). Aussi, il est recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter la manipulation du pansement.
- Les professionnels de santé doivent tenir compte du fait que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent particulièrement chez l'enfant et le nouveau né sont peu documentées.
- L'utilisation du pansement **Urgocell Ag** pendant la grossesse, l'allaitement, chez le nouveau-né ainsi que les prématurés n'a pas été étudiée.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : La réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas re-stériliser.

□ CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilisation connue à l'argent et aux autres composants du pansement.
- Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d'un examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

□ CONDITIONS DE CONSERVATION :

Stocker **Urgocell Ag** à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C). Radio-stérilisé.