

URGOTUL ABSORB
URGOTUL ABSORB Talon

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE LIPIDO-COLLOÏDE

□ **DESCRIPTION :**

Urgotul Absorb est un pansement absorbant de type hydrocellulaire bénéficiant de la technologie TLC micro-adhérente, innovation des Laboratoires Urgo.

La technologie TLC micro-adhérente consiste à assembler une compresse polyuréthane avec une matrice lipido-colloïde micro-adhérente qui facilite la pose, le positionnement et le retrait atraumatique du pansement par ses propriétés de micro-adhérence.

Urgotul Absorb est constitué :

- d'une masse lipido-colloïde micro-adhérente au contact de la plaie déposée sur une compresse polyuréthane absorbante,
- d'un support non tissé en polyuréthane élastique.

□ **PROPRIETES :**

En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes issues de la TLC micro-adhérente se gélifient et forment un film lipido-colloïde à l'interface plaie/pansement.

Il en résulte des propriétés spécifiques :

- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
 - retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
 - caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
 - respect de la peau péri-lésionnelle.
-
- La compresse absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau péri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
 - Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une bonne conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
 - Le pansement micro-adhérent facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement.

□ **INDICATIONS :**

Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarre, ulcère, pied du diabétique) et aiguës (brûlure du 2^{ème} degré, dermabrasion, plaie traumatique, plaie post-opératoire...) et dans le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association avec son traitement spécifique.

Urgotul Absorb Talon est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives localisées au talon : plaies chroniques (escarres talonnières...), plaies aiguës (brûlure du 2^{ème} degré, dermabrasion, plaie traumatique, plaie post-opératoire...).

En raison de leur caractère non adhésif, **Urgotul Absorb** et **Urgotul Absorb Talon** sont recommandés dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

□ MODE D'EMPLOI :

- **Préparation de la plaie : Forme Standard et Forme Talon :**

- nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer au sérum physiologique,
- Si un antiseptique a préalablement été utilisé, rincer attentivement la plaie au sérum physiologique avant d'appliquer **Urgotul Absorb**.
- sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle.

- **Application du pansement :**

Urgotul Absorb peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.

Forme Standard :

- o retirer les ailettes de protection.
- o Appliquer la face micro-adhérente du pansement **Urgotul Absorb** sur la plaie.
- o Maintenir le pansement en place avec une bande de fixation.
- o **Urgotul Absorb** peut être posé sous contention, si elle est prescrite.

Forme Talon :

- o Le pansement à la forme d'une flèche. Retirer les ailettes de protection et placer le talon au centre de la face micro-adhérente du pansement (partie rétrécie de la flèche).
- o Fixer la partie postérieure de la flèche au niveau du tendon d'Achille.
- o Appliquer soigneusement les parties latérales du pansement de part et d'autre du pied.
- o Maintenir le pansement en place avec une bande de fixation.

- **Renouvellement du pansement :**

Urgotul Absorb et **Urgotul Absorb Talon** se renouvellent tous les 2 à 4 jours, en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

Urgotul Absorb et **Urgotul Absorb Talon** peuvent être laissés en place jusqu'à 7 jours sous compression multicouches dans l'ulcère de jambe d'origine veineuse, en cas de prescription associée et justifiée par l'évolution clinique de la plaie.

□ MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'**Urgotul Absorb** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, il est recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien.
- **Urgotul Absorb** ne doit pas être utilisé en caisson hyperbare.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas re-stériliser.

□ CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilité connue au pansement.

□ CONDITIONS DE CONSERVATION :

Stocker **Urgotul Absorb** à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C).
Radiostérilisé (rayonnement β).