

URGOTUL BORDER (SILICONE)

PANSEMENT HYDROCELLULAIRE ADHESIF AVEC MATRICE TLC MICRO-ADHERENTE ET BORD SILICONE

□ DESCRIPTION :

UrgoTul Border est un pansement lipido-colloïde absorbant adhésif de type hydrocellulaire, avec matrice TLC micro-adhérente, une technologie innovante développée par les Laboratoires Urgo.

UrgoTul Border est constitué :

- d'une matrice TLC micro-adhérente, associée à une mousse polyuréthane absorbante et une couche super-absorbante
- d'un support extérieur imperméable (mais permettant les échanges gazeux) enduit d'une couche siliconée adhésive

Cette combinaison spécifique est une structure brevetée.

□ PROPRIETES :

UrgoTul Border offre tous les avantages de la TLC et des bords adhésifs siliconés (maintien d'un milieu humide, optimisation du résultat cicatriciel, retrait atraumatique et indolore).

TLC (Technologie Lipido-Colloïde)

La TLC est une technologie innovante et brevetée qui consiste en l'association unique de polymères et de particules hydrocolloïdes, permettant un retrait atraumatique et indolore pour le patient et favorisant aussi la cicatrisation. Au contact des exsudats de la plaie, ces particules se gélifient et créent un milieu humide favorable au processus de cicatrisation afin que s'exerce l'action des cellules clés impliquées dans le processus de réparation tissulaire (fibroblastes, kératinocytes, macrophages). **UrgoTul Border** optimise ainsi le résultat cicatriciel.

L'efficacité de la TLC a été démontrée dans de nombreuses études cliniques incluant plus de 36 000 patients.

La compresse absorbante de mousse polyuréthane et la couche super-absorbante d'**UrgoTul Border** assurent un drainage optimal des exsudats, évitant la macération. Le pansement peut être posé sous compression, lorsque celle-ci est prescrite.

Le support imperméable d'**UrgoTul Border** est doux, très conformable et non-occlusif : il permet une bonne conformabilité aux différents reliefs anatomiques de la plaie, évite la fuite d'exsudats et forme une barrière contre la contamination bactérienne de l'extérieur. Sa forte perméabilité aux échanges gazeux assure la vaporisation de l'excédent d'exsudats limitant tout risque de macération. Il suit les mouvements du corps et garantit le confort du patient. Les bords siliconés adhésifs assurent une bonne adhésivité avec une haute tolérance cutanée ; il peut être facilement repositionné. Le support adhésif évite l'utilisation d'un pansement secondaire. Grâce à sa transparence, il est possible de contrôler la saturation du pansement pour le renouveler uniquement lorsque nécessaire.

Les propriétés d'**UrgoTul Border** sont donc multiples :

- optimisation du résultat cicatriciel
- absorption des exsudats et drainage limitant le risque de macération
- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation
- retrait atraumatique et indolore pour les patients
- bords siliconés adhésifs waterproof

- très confortable et facilement repositionnable

□ INDICATIONS :

UrgoTul Border est indiqué dans le traitement des plaies exsudatives aiguës (brûlures du 2nd degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires...) et chroniques (ulcères de jambes, escarres, plaies du pied diabétique).

Le format Sacrum est recommandé pour les plaies localisées au niveau de la région sacrée (escarres sacrées...).

□ MODE D'EMPLOI :

- **Préparation de la plaie :**
 - Nettoyer la plaie selon le protocole de soins habituel.
 - Si un antiseptique a préalablement été utilisé, rincer attentivement la plaie au sérum physiologique avant d'appliquer **UrgoTul Border**.
 - Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle.
- **Application du pansement :**
 - Retirer les ailettes de protection.
 - Appliquer la compresse centrale micro-adhérente **d'UrgoTul Border** au regard de la plaie (les bords siliconés adhésifs doivent être au moins à 1 cm de la plaie).
 - Lisser le pansement sur la plaie.
 - Appliquer une bande de compression sur le pansement lorsque celle-ci est prescrite.
- **Application du format Sacrum :**
 - Placer le pansement avec la pointe vers le bas de la zone sacrée.
- **Retrait du pansement :**

En appuyant sur la peau saine, soulever un coin du pansement et le retirer délicatement.
- **Renouvellement du pansement :**

Le pansement **UrgoTul Border** se renouvelle tous les 2 à 4 jours, et peut rester en place jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.

□ MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Incluant une couche super-absorbante, la compresse centrale ne doit pas être découpée. Cependant, les bords adhésifs siliconés peuvent être découpés avec du matériel stérile afin de se conformer aux différents reliefs anatomiques.
- En présence de signes cliniques d'infection locale, le traitement peut, à l'appréciation du médecin, être relayé par un pansement antibactérien de la gamme Urgo (type Urgocell Ag Border).
- Couper l'excédent de pilosité au plus près de la peau pour assurer un bon contact avec la plaie.
- En cas d'utilisation concomitante avec une crème, une pommade, un onguent, une émulsion, laisser sécher la peau avant l'application du pansement.
- **Urgotul Border** ne doit pas être utilisé en caisson hyperbare.
- Conditionnement individuel stérile à usage unique : la réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas re-stériliser le pansement.

□ CONTRE-INDICATIONS :

- Sensibilité connue au pansement.

□ CONDITIONS DE CONSERVATION :

Stocker **Urgotul Border** à l'abri de la lumière. Stérilisation par Oxyde d'éthylène.