


# Exufiber®

## Mode d'emploi




Nettoyer la plaie et sécher soigneusement la peau périlésionnelle.

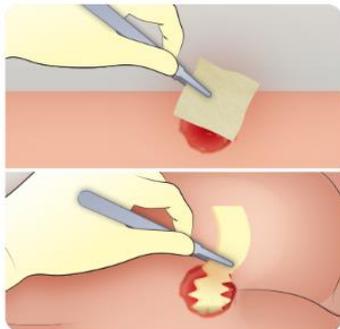


Appliquer un pansement Exufiber® sec sur la plaie.

**Ne pas humidifier.**

Utiliser une compresse pour les plaies superficielles et la mèche pour les plaies profondes.

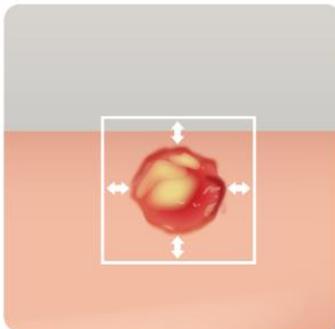

Exufiber® doit déborder sur la peau périlésionnelle d'au moins **1 à 2 cm** pour le format **plaque** et **2 à 3 cm** pour le format **mèche**.

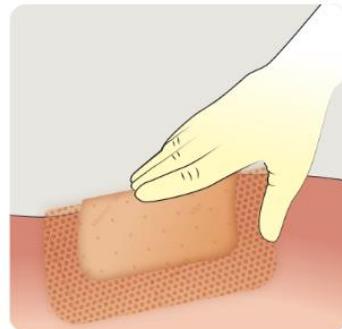

Recouvrir d'un pansement secondaire approprié.

**Le choix du pansement dépend de la quantité d'exudats.**

Fixer ou recouvrir à l'aide d'un pansement adhésif ou d'un bandage si nécessaire.

**Exufiber® peut être utilisé sous compression.**

## Conseils de découpes et de poses

