


Mepilex® Transfer

Mode d'emploi

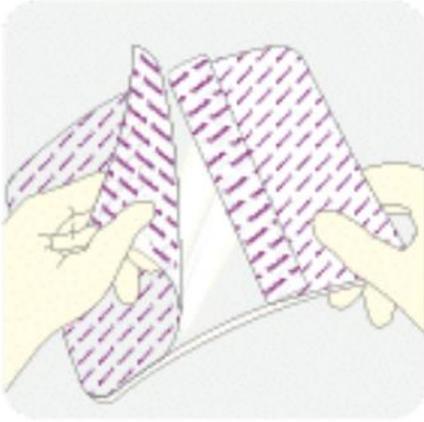

Nettoyer la plaie.
Sécher soigneusement
le pourtour. Retirer le
feuillet protecteur le
plus large.



Mepilex® Transfer devra
déborder sur la peau
péri-lésionnelle d'au
moins 2 cm.
Si nécessaire, Mepilex®
Transfer peut être
découpé.



Maintenir Mepilex®
Transfer avec un bandage
tubulaire (exemple :
Tubifast® 2-Way Stretch®
ou un film (exemple :
Mepitel® Film).



Conseils de découpes et de poses

