


# Mepitel® Film

## Mode d'emploi

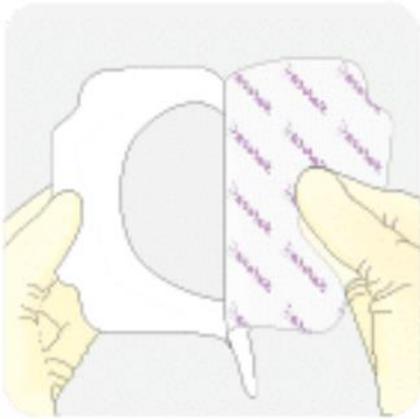

Nettoyer la plaie. Choisir une taille de Mepitel® Film qui recouvre la plaie et déborde sur la peau périlésionnelle d'au moins 2 cm. Si nécessaire, Mepitel® Film peut être découpé. Laisser le feuillet protecteur le plus large et retirer le petit feuillet.



Appliquer Mepitel® Film sur la plaie en une seule épaisseur. Retirer le second feuillet protecteur.



Retirer le bord cadre.



## Conseils de découpes et de poses

