



Mepitel® One

Mode d'emploi

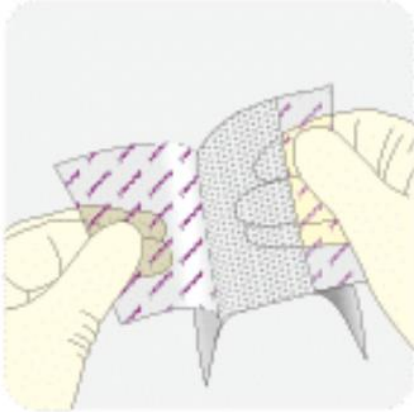

Nettoyer la plaie. Choisir une taille de Mepitel® One ou Mepitel® qui recouvre la plaie et déborde sur la peau périlésionnelle d'au moins 2 cm. Si nécessaire, Mepitel® One ou Mepitel® peut être découpé. Laisser le feuillet protecteur le plus large et retirer le petit feuillet.

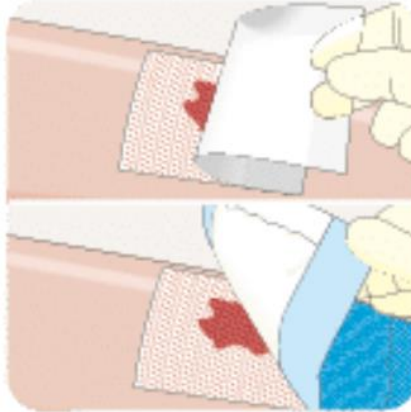

Appliquer Mepitel® One ou Mepitel® sur la plaie en une seule épaisseur. Retirer le second feuillet protecteur. Recouvrir d'un pansement secondaire : compresses (exemple : Mesoft®, Gauze®), pansement américain (exemple : Mesorb®), superabsorbant (exemple : Mextra®).



Maintenir l'ensemble avec un bandage tubulaire (exemple : Tubifast® 2-Way Stretch®) ou un film (exemple : Mepitel® Film).



Conseils de découpes et de poses

